

Noodliften.nl

Handleiding



Bediening omhoog/omlaag

rolgordel gebruiken verplicht

Veiligheid schakelaars



Afstandbediening voor het halen en brengen van de lift

Hendel voor het draaien van de stoel



- Gebruik de afstandbediening welke aan de muur hangt om de lift op te roepen, richt de afstandsbediening op de lift en houdt de knop ingedrukt tot de lift uiterst boven of beneden is.
- Draai de stoel en neem plaats, draai de stoel in de rechte positie voor gebruik, wanneer de stoel niet recht staat zal de lift niet functioneren.
- Bediening omhoog / omlaag bevindt zich op de leuning. Knop ingedrukt houden tot de lift uiterst boven of beneden is, de lift stopt automatisch.
- Wanneer de lift niet wordt gebruikt dient deze uiterst boven/beneden te staan, en de stoel dient recht te staan, zo worden de accu's geladen en is in en uit stappen het meest veilig.
- Heb geduld.

- In noodgevallen bel: (085) 4863399
- Maximaal gebruikersgewicht 127 KG
- Rolgordel gebruiken verplicht
- Gebruik voor eigen risico
- U vindt een instructiefilm op www.noodliften.nl

